

فیلتره شدن از ماسک عبور کند.
محافظ / محافظ صورت

محافظ و محافظ صورت را روی صورت قرار داده و آن را مناسب تنظیم کنید.



دستکش

ها را تا مچ دست بپوشانید



دست ها را بطور کامل بشویید و خشک کنید»



دست ها را بطور کامل بشویید و خشک کنید»



دست ها را بطور کامل بشویید و خشک کنید»

بدون

عینک .۳

عینک
چشمان
بصورت

دستکش .۴

دستکش

گان .۳

قسمت جلو و آستین های گان آلوده است - آن را لمس نکنید

گره ها را باز کنید و یک دست خود را به قسمت داخلی گان برده و آن را از ناحیه شانه و گردن به پایین بکشید. در حین درآوردن گان آن را وارونه کنید به نحوی که بخش داخلی آن رو به خارج قرار گیرد. گان خارج شده از تن را لوله یا تا کنید و به داخل سطل زباله بیندازید.

ماسک .۴

قسمت جلو ماسک آلوده است - آن را لمس نکنید!

گره ها را باز کنید و بند تحتانی را گرفته و آنرا از پشت سر خارج کنید، سپس بند فوقانی را گرفته از پشت سر بیرون آورید. ماسک را به داخل سطل زباله بیندازید

دستهای خود را بطور کامل بشویید و خشک کنید

گان

داخل و جلوی گان را درست از قسمت خط با دو دست گرفته و تالی آن را کامل باز کنید که داخل گان به سمت بدن باشد. با آن تا حدی داخل آستین ببرید که گان روی پا گیرد پشت گردن و کمر را محکم ببندید



ماسک

، را به گونه ای ببندید که اطراف دهان و بینی لاد بپوشاند
نه باید در محل خود قرار گیرد و از آویزان آن از گردن خودداری نمایید.
ماسک را نباید به حدی شل بست که هوا از آن عبور کند و یا به حدی سفت بست که هوا



دست ها را بطور کامل بشویید و خشک کنید»



! لمس نکنید!

گان .۱

قسمت
گردن
طوری
دست
شانه
بندهای

ماسک .۲

ماسک
را کلاه
ماسک
کردن
بند
کنار

عینک محافظ / محافظ صورت .۲

قسمت خارجی عینک یا حفاظ صورت آلوده است - آن را لمس نکنید

برای برداشتن عینک دسته های آنرا بگیرید (حفاظ صورت را از بند آن بگیرید).
محافظ چشم(عینک یا حفاظ صورت)را جهت ضد عفونی در ظروف مخصوص تعیین شده قرار دهید (در صورت یکبار مصرف بودن آن را در سطل زباله بیندازید).

طریقه صحیح پوشیدن لوازم حفاظت فردی

ت فردی

دستکش .۱

زیر آلات و ساعت خود را خارج و موهای خود را جمع کنید